

# 永生トピックス

(No. 43)

2007/10/2 薬剤科

## 自己血糖測定器の使用上の注意 『警告』

対象機種:「アキュチェックコンフォート」「アキュチェックコンパクト」「アキュチェックアクティヴⅡ」

★ 院内採用の血糖測定器、『メディセーフミニ』ではおきていません

実際の血糖値より高値を示すことがあるので、以下の患者には使用しない

- マルトースを含む輸液と投与中の患者
  - イコデキストリンを含む透析液を投与中の患者
  - ガラクトース負荷試験中の患者
  - キシロース吸収試験を実施中の患者
  - PAM(有機リン剤中毒解毒剤)を投与中の患者
- 
- 上記の薬を投与中の患者様の血糖を自己血糖測定器で計った場合、実際の血糖値より高値を示すことがあるので、その偽高値に基づきインスリンなどの血糖降下剤を投与すると、昏睡などの低血糖症状が現れるおそれがあります。
  - 家庭での測定に使われる場合、ほとんど問題はありませんが、念のため患者様にご注意ください。